



— CONOSCI I TUOI IMPIANTI E  
**SORRIDI**  
ALLA VITA

## **Informazioni per la sicurezza del paziente**

Prenditi cura dei tuoi *impianti*, del tuo *sorriso* e della tua *salute*

**Lo sapevi?**

# 3,600,000,000\*

persone nel mondo  
a cui mancano denti.

\* conclusione basata su diversi rapporti scientifici

# 20.000.000\*

persone in Italia che hanno perso denti.

# 110.000.000\*

denti mancanti in Gran Bretagna.

# 180.000.000\*

persone in Nord America che hanno perso denti.

I motivi per cui sono numerosi comprendono  
incidenti, malattie e cure insufficienti.

\* conclusione basata su diversi rapporti scientifici

# — Un pioniere nell'implantologia dentale

*25 anni di ricerca clinica  
ed evoluzione industriale*

**A**dvan ricerca, sviluppa e produce impianti dal 1993. In collaborazione con rinomate cliniche internazionali, istituti di ricerca e università, Advan ha aperto la strada a molte delle più influenti e rivoluzionarie tecnologie e tecniche nell'odontoiatria implantare, con l'obiettivo di migliorare il successo dell'impianto e migliorare l'esperienza del paziente.

## — Qualità “Made in Italy”

Grazie alle radici italiane nell'ingegneria di precisione e l'eccellenza dei risultati clinici, Advan Dental Implant Systems hanno conquistato la fiducia in tutto il mondo.



## — Innovazioni per migliorare la cura del paziente.

I prodotti e le tecnologie Advan sono stati progettati per migliorare il successo della riabilitazione implantare e migliorare l'esperienza del paziente. L'originale Advan BioPlatform consente all'osso stesso di proteggere l'impianto dall'infiltrazione batterica. L'originale design implantare Advan High Biologic Performance consente al chirurgo di utilizzare impianti più piccoli e più corti in modo che possano essere posizionati sempre con la corretta posizione e angolazione per rispettare i tessuti biologici peri-implantari. L'originale concetto di impianto modulare consente al tessuto biologico di crescere sulla superficie del titanio e di creare un sigillo evitando le infiltrazioni batteriche, pertanto la riabilitazione dell'impianto può durare idealmente tutta la vita. L'originale concetto di Advanced Tissue Management è la somma di 25 anni di ricerca clinica e di evoluzione industriale che creano un nuovo standard rivoluzionario per l'implantologia orale.

# **— La terapia implantare dentale è oggigiorno il trattamento di elezione**

La decisione di sostituire i denti mancanti con impianti dentali è un ottimo investimento per la salute e l'aspetto orale. **Gli impianti migliorano la qualità della tua vita e sono molto più redditizi nel lungo periodo.** Se hai un problema possiamo risolverlo e rispettando tutte le tue esigenze. Un dente sano non significa solo funzionalità. I denti sono una parte essenziale del tuo aspetto: quando guardiamo gli altri, istintivamente ci concentriamo su occhi e bocca. Quindi siamo d'accordo con le vostre aspettative di estetica naturale delle riabilitazione dentali. Ci sono molti sistemi di impianto sul mercato, ma non sono tutti uguali. Al giorno d'oggi il restauro di un impianto dentale è un trattamento orale riconosciuto come il gold standard per la sostituzione del dente singolo e la riabilitazione della bocca completamente edentula: la popolarità del trattamento impiantare ha reso disponibili sul mercato molti sistemi a basso costo e, inoltre, non basati su una dovuta ricerca scientifica. Di solito i pazienti non sono consapevoli del fatto che ci possono essere importanti differenze nei sistemi implantari dentali, comprese le variazioni nella qualità e nella ricerca e nelle prestazioni cliniche a lungo termine. Spenderebbe davvero denaro per qualcosa che non si basa sulla ricerca scientifica e rischiando di dover affrontare fallimenti precoci o infezioni batteriche?

*Advan offre una vasta gamma di soluzioni implantari di alta qualità per migliorare la qualità della vita e la propria autostima.*



Terapia implantare dentale

Perdita di un dente singolo

Perdita di più denti

LA TERAPIA IMPLANTARE DENTALE È OGGIORNO  
IL TRATTAMENTO DI ELEZIONE

## Supportato dalla ricerca scientifica

Il sistema implantare Advan ha un approccio molto innovativo ma con un supporto scientifico altrettanto importante, acclamato dai dentisti per le nostre soluzioni rivoluzionarie. Il sistema implantare Advan è stato testato con analisi istomorfometrica nell'osso mascellare umano (con conseguente analisi scientifica e pubblicazione di articoli) prima della vendita sul mercato libero. Credi che ogni sistema implantare sul mercato sia sottoposto alla stessa approvazione scientifica? Siamo spiacenti ma la risposta è no.

## Ispirato dalla natura


Un impianto dentale è una radice artificiale di dente che viene inserita nella mascella al posto della radice del dente naturale mancante. Advan Advanced Tissue Management è il nostro approccio implantare che ti garantisce un successo a basso rischio e a lungo termine: hai un'alternativa in titanio che agisce e sembra un dente naturale e sano.

moderni impianti dentali sono piccole viti, fatte di materiali biocompatibili, fissate nella vostra mascella che prendono il posto delle vostre radici naturali. Dopo una delicata procedura chirurgica, il dentista può posizionare un dente sostitutivo sugli impianti dentali senza alcuna differenza estetica rispetto ai denti naturali.



Impianto tradizionale

Advan High Biological Performance Implant

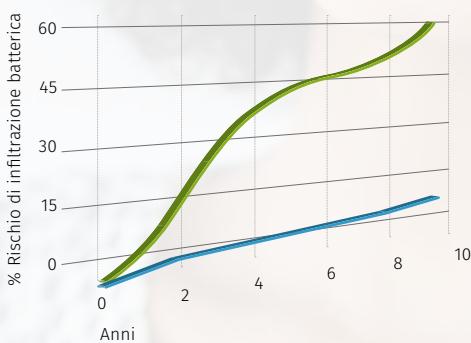

 Impianto tradizionale     Advanced Tissue Management

Grazie al protocollo Advanced Tissue Management possiamo mantenere estremamente basso il rischio di contaminazione batterica del tuo impianto dentale, anche a lungo termine: ciò significa mantenere bassi i costi per mantenere perfette la tua salute e la tua estetica.

## **— Perdita di un dente singolo**



**Hai perso un dente e non sei sicuro di cosa fare al riguardo?**

Il tuo dentista deve estrarre un dente dalla bocca e non pensi che sia necessario sostituirlo?

***Non sei solo!***

**P**erdere un dente per la prima volta può essere un'esperienza drammatica. Sai che alla metà della popolazione mondiale mancano uno o più denti? Tu sei unico ma questo è un problema comune. Ci sono diverse ragioni come un trauma, una malattia o cure dentali non corrette.

### ***— Non visibile non significa non necessario***

**U**n sorriso dall'aspetto naturale è un simbolo di bellezza e salute. E questo è vero! La maggior parte delle persone si affrettano a raggiungere la clinica dentale se mancano uno o più denti frontali. Ma anche un dente mancante nella parte posteriore della tua bocca può creare un risultato disfunzionale e non estetico per la tua salute e, poiché nascosto alla vista, potresti non vedere l'immediata necessità di sostituirlo, ma ti suggeriamo di evitare questo errore! Lasciare non trattato un dente mancante può avere gravi conseguenze per la tua salute, il tuo aspetto e la tua vita quotidiana.

## PERDITA DI UN DENTE SINGOLO


### Cosa succede quando manca un dente?

Un dente sano ha diversi ruoli, anche se posizionato nella parte posteriore della bocca. Partecipa alla funzione di masticazione e stabilizza i denti circostanti.

### Effetti sui denti circostanti

Quando perdi un dente, questo ha un effetto sui denti circostanti. I denti vicini sono lasciati senza supporto. Cominciano a spostarsi e possono persino cadere a causa della mancanza di stabilità. I denti nella mascella opposta estruderanno e si muoveranno occupando lo spazio vuoto, rendendo difficile o addirittura impossibile sostituire in futuro il dente mancante. Non sostituire il dente mancante può portare al collasso dei denti circostanti con conseguente estrazione degli stessi. Non sostituire un dente può portare a dover sostituire più denti in futuro. Più denti ti mancano in bocca, più difficile sarà per il tuo dentista ridarti il sorriso.

*Un dente mancante  
può far spostare  
i denti vicini o  
estrudere nello  
spazio vuoto.*

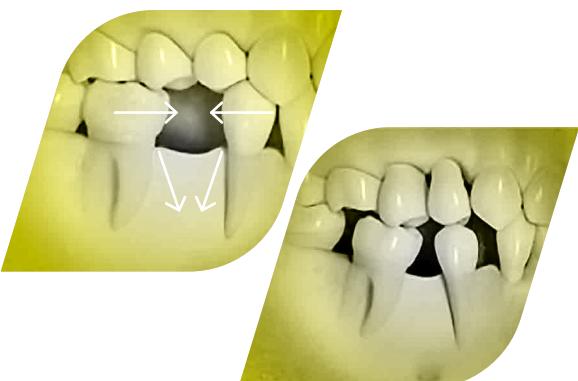

## — Effetti su mascella e gengive

**I denti sani eseguono costantemente piccoli micromovimenti in bocca stimolando le gengive e l'osso della mascella.** Quando manca un dente, la mascella non riceve più il corretto carico, inizia a riassorbirsi e la gengiva si ritira di conseguenza.

## — Effetti sul tuo aspetto

**I denti mancanti e l'osso mascellare riassorbito non possono più sostenere le labbra dall'interno.** Più denti si perdono e più il tuo viso cambierà mostrando un aspetto del tuo viso più vecchio e rugoso. Le tue guance e le tue labbra, lasciate senza il supporto necessario, diventano vuote e cedevoli.

## — Effetti sulla tua vita di tutti i giorni

**Non sostituire un dente può iniziare una reazione a catena di conseguenze e non ti suggeriamo di seguire questa strada.** Evitare i tuoi pasti preferiti perché difficili da mangiare o evitare i tuoi amici perché imbarazzato dal tuo aspetto significa ridurre drasticamente la qualità della vita.

Fortunatamente puoi evitare queste conseguenze! **Parla con il tuo dentista dei tuoi denti mancanti,** sostituisci il dente mancante e recuperi il tuo sorriso e la qualità della vita.

## PERDITA DI UN DENTE SINGOLO

### Cosa sono i denti sostitutivi?


Le corone e i ponti dentali sono chiamati denti sostitutivi. Sono usati per sostituire qualsiasi dente mancante. Possono essere posizionati su denti naturali fresati o su impianti dentali.

### Denti sostitutivi su denti naturali

Il restauro del dente mancante può essere eseguito dal dentista che fissa un cosiddetto ponte sui denti che circondano il vuoto lasciato proprio dal dente da riabilitare. Ma per stabilizzare il ponte il tuo dentista deve ridurre le dimensioni dei denti circostanti e incollare su di essi il ponte, cosa che può significare sacrificare due denti perfettamente sani per sostituire quello mancante.

Di solito la protesi del ponte è realizzata dal laboratorio odontotecnico utilizzando materiali di aspetto naturale come la ceramica. Attenzione alle corone e ponti in metallo ricoperti solo di materiale estetico. Senza il fisiologico carico masticatorio la mandibola si ritrarrà seguita dalla gengiva e una linea scura sul bordo del ponte inizierà a diventare visibile nella bocca. Ti consigliamo di chiedere sempre un ponte privo di metalli.

Quindi un ponte supportato da denti naturali deve necessariamente implicare di sacrificare due denti sani e comunque non impedisce il riassorbimento osseo e gengivale (perché il ponte non può caricare l'osso in corrispondenza del dente mancante). L'unico modo per ricreare funzionalità ed estetica è un impianto dentale in titanio.

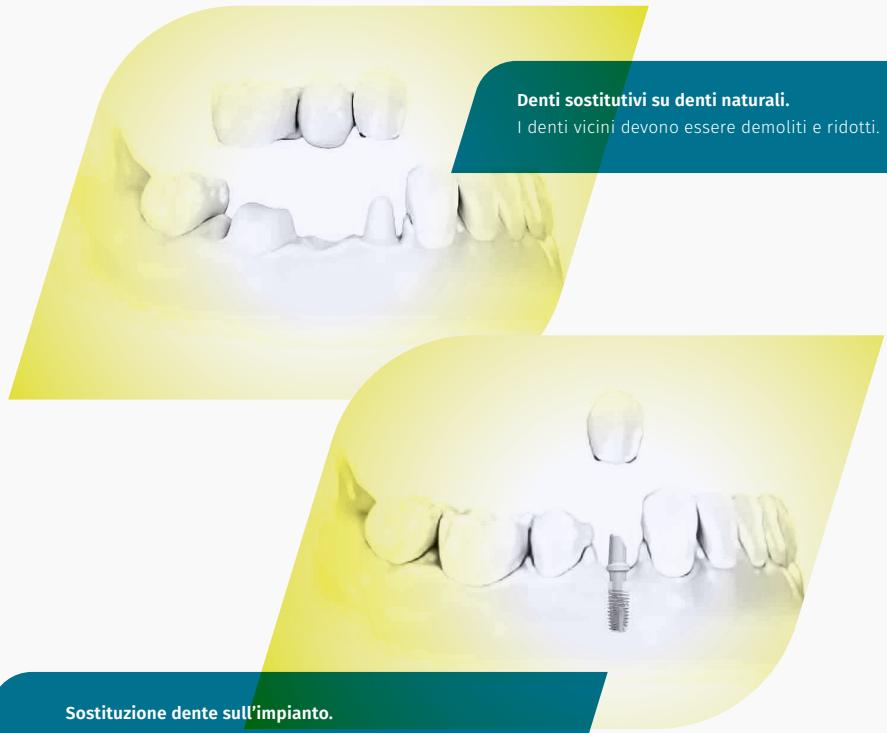

## Sostituzione dei denti su impianti dentali

Gli impianti dentali sono inseriti nella mascella e funzionano come le radici dei denti naturali. La terapia implantare dentale ha lasciato intatti i denti sani adiacenti e ha fornito alla mascella la corretta stimolazione per evitare il riassorbimento dell'osso. I tuoi denti sani sono rispettati, l'osso della tua mascella è mantenuto.

Perdita di un dente singolo

Perdita di più denti



*Gli impianti dentali  
offrono molti vantaggi*

## Protesi su impianto dentale

### Durata

Con la giusta cura può durare fino a una vita

Circa 5-10 anni

### I denti vicini sani devono essere demoliti

No

Sì

### Mantenere puliti i nuovi denti a casa

Sforzo normale

Più complicato

### Rischio di carie o fratture

Molto basso

Sì

## Ulteriori vantaggi della sostituzione sull'impianto dentale sono:

- Un sorriso **dall'aspetto naturale**
- Gli impianti dentali si percepiscono **esattamente come i propri denti naturali** con una sensazione di stabilità e confort
- Rischio non significativo di rigetto in quanto gli impianti dentali sono fatti di **materiale biocompatibile**
- **Normale** funzione di masticazione e conversazione
- Miglioramento **dell'autostima**



## **Abbiamo buone notizie!**

Il tuo tempo con dubbi o impianti falliti può finire presto;  
**puoi riacquistare il sorriso di una vita** in un solo giorno.\*

# **Il concetto di trattamento Advanced Tissue Management**

Per ottenere facilmente risultati clinici eccellenti, il sistema implantare dovrebbe fornire al chirurgo e al protesista un pacchetto di prodotti e protocolli perfettamente calibrato. I protocolli devono essere semplici, veloci ed economici. D'altra parte, i prodotti devono essere facili da usare e garantire al dentista efficacia ed efficienza. Per questi motivi, i sistemi implantari Advan combinano nello stesso prodotto le caratteristiche chiave di successo che ogni implantologo sta cercando.

\* Se i criteri del paziente sono soddisfatti e si ottiene un'adeguata stabilità, i nostri impianti possono essere caricati con un restauro provvisorio fisso lo stesso giorno dell'intervento. Il trattamento con impianti dentali è una procedura chirurgica e richiede una valutazione preliminare da parte del vostro dentista per assicurarsi che la vostra salute dentale e generale consenta il trattamento implantare. Determinate condizioni dentali devono essere soddisfatte per eseguire il protocollo di trattamento di carico immediato. Il dentista può suggerire alternative o variazioni del trattamento.

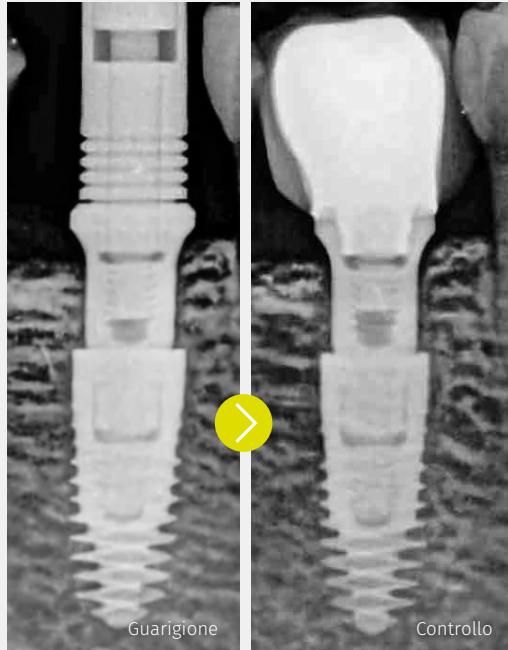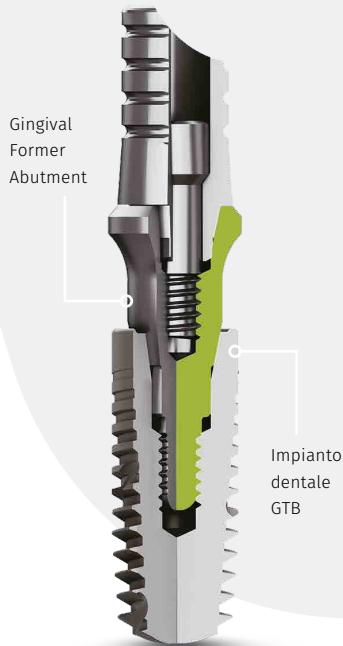

Per gentile concessione del Dr. Albert Vericat - Valencia (ES)

Controllo clinico a lungo termine con perfetta conservazione dei tessuti perimplantari. Biologicamente sicuro, esteticamente perfetto.

**Non usiamo immagini rielaborate. Vi mostriamo cosa realmente accade con il nostro sistema implantare.**

Il concetto di trattamento Advanced Tissue Management è una comprovata soluzione implantare progettata appositamente per i restauri di denti singoli.

Usando i sistemi implantari Advan e l'innovativa soluzione protesica di Gingival Former Abutment, il dentista può garantire un restauro dall'aspetto naturale. Il concetto di trattamento Advanced Tissue Management fornisce un dente provvisorio fisso, funzionale e stabile in un solo giorno\*.

Migliaia di persone hanno beneficiato del concetto di trattamento Advanced Tissue Management, ed è supportato da quasi 10 anni di studi e ricerche. Migliaia di persone hanno scelto un impianto dentale che garantisce prestazioni sia estetiche che biologiche.



## *Vantaggi del Advanced Tissue Management*

### **Miglioramento della qualità della vita**

Ritrova i denti che sembrano naturali. E, a seconda della situazione, il dentista può posizionare i denti provvisori lo stesso giorno in cui vengono posizionati gli impianti.

### **Impianto dentale che funziona biologicamente come un dente naturale sano**

Evita qualsiasi rischio di contaminazione batterica e preserva i tessuti peri-implantari come l'osso e la gengiva per garantire l'estetica perfetta di cui hai bisogno, per tutta la vita.

### **Supportato dalla scienza**

Sviluppato da Advan, il suo successo è dimostrato da numerosi studi clinici e da 10 anni di follow-up clinico.

### **Investi nel resto della tua vita**

I costi possono sembrare alti a prima vista, ma gli alti costi di manutenzione di altri restauri possono renderli molto più costosi a lungo termine. Con una buona cura, i tuoi impianti possono durare tutta la vita.

Parla con il tuo dentista di un moderno restauro dentale, se ...

**... uno o più denti in bocca mancano o devono essere rimossi.**

**si.** Un restauro dentale al momento giusto può prevenire ulteriori complicazioni della salute orale che potrebbero interessare i denti sani rimanenti.

**... stai evitando certi cibi, perché sono troppo difficili da mangiare.**

**sostituire.** Sostituire il dente mancante riporta la tua piena funzione masticatoria, così puoi tornare a gustare i cibi che ami.

**... soffri di mal di testa o emicranie perché hai perso uno o**

**più denti.** I denti mancanti possono spesso influire sul posizionamento degli altri denti sani, causando un malfunzionamento delle mascelle superiore e inferiore e rigidità del muscolo e delle articolazioni.


**... lla tua silhouette facciale è cambiata da quando hai perso**

**uno o più denti.** Una mancanza di denti può ridurre gravemente la densità dell'osso mascellare, perché non viene più stimolato durante la masticazione. Questo porta a una mascella contratta che ti fa sembrare più vecchio di quello che sei veramente.

**... sei scontento di come appaiono i tuoi denti.** I tuoi denti sono

scoloriti, irregolari o influenzano il tuo sorriso o il tuo profilo facciale? Chiedi al tuo dentista le opzioni per ripristinare il tuo bel sorriso.

## **— Perdita di più denti**

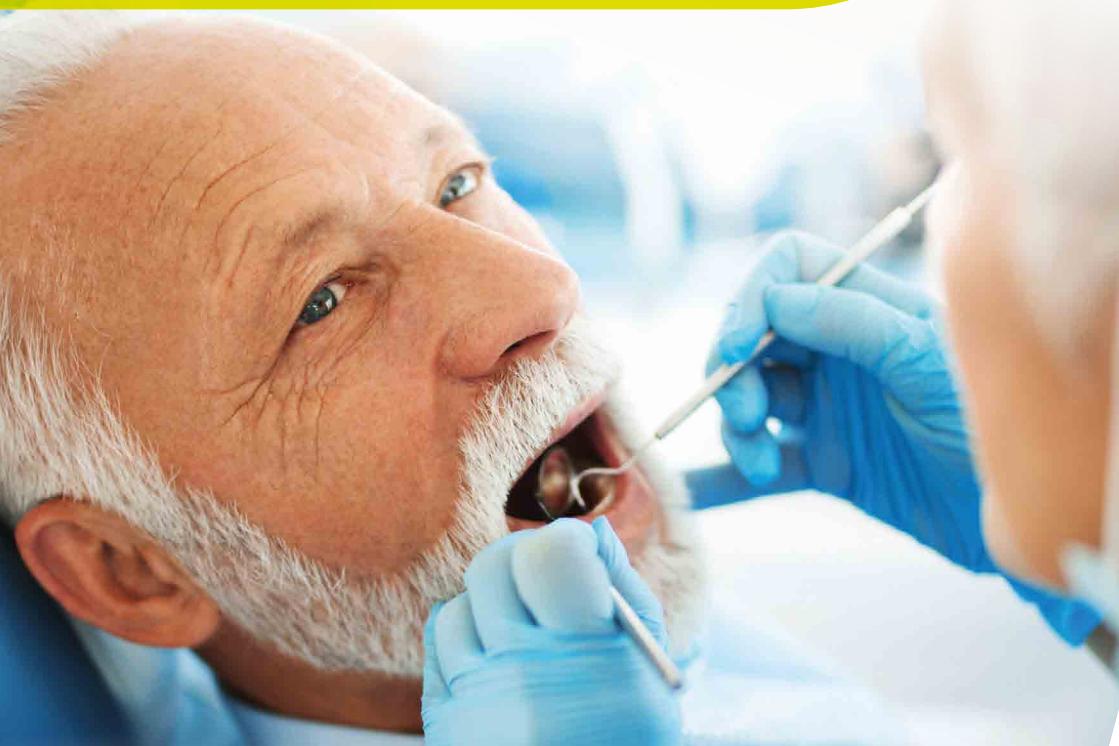

**N**on ti ricordi l'ultima volta che hai dato un morso al tuo cibo croccante preferito? Preferisci evitare di parlare in pubblico a causa di problemi con i denti? Hai avuto una protesi che ti ha causato problemi e disagio invece del supporto di cui hai bisogno?

## Più che un sorriso

Un ruolo importante viene svolto ogni giorno dai tuoi denti. Un sorriso affascinante e naturale è riconosciuto come simbolo di bellezza e salute. Questo è vero, non è solo una sensazione! Inoltre, i denti sani e funzionanti ti consentono di gustare i cibi che più ami. I tuoi denti ti fanno sentire sicuro nella tua routine quotidiana e ti permettono di essere socialmente attivi anche durante la vecchiaia.

Ogni dente mancante può avere un impatto negativo sulla qualità della tua vita. Pertanto, è importante trovare la soluzione migliore e di lunga durata con il vostro dentista.

## Le protesi spesso non sono la risposta giusta

Quando mancano molti denti, le protesi spesso sono la prima soluzione a cui si pensa. Ma chi indossa la protesi di solito si lamenta di problemi e disagi causati dalla protesi stessa. Inoltre, anche dopo diverse visite dentistiche per adattare al meglio la protesi dentaria, alcune pazienti continuano ad essere frustrati e senza una valida soluzione.

Se sapete perfettamente di cosa stiamo parlando, le moderne soluzioni di impianto dentale possono aiutarvi a ripristinare la piena funzionalità dei denti e la qualità della vostra vita. Il vostro dentista può aiutarvi a trovare la soluzione giusta per sostituire le protesi mal realizzate con una serie di denti belli e perfettamente funzionanti. Perché non ricominciare a mangiare di nuovo il tuo pasto preferito? Può essere solo a pochi passi.



*Conseguenze di protesi mal adattante*

### **— *Disagio e scomodità inopportuna***

Potresti non essere soddisfatto della vestibilità della tua protesi dentale e questa sensazione è comune ai portatori di protesi. Quando una protesi non si adatta perfettamente, si muove mentre si mangia e si parla. Questa non è solo una sensazione spiacevole, ma può anche portare a infiammazioni dolorose.

La perdita di denti e  
di tessuto osseo por-  
tano a cambiamenti  
del tuo aspetto

## Difficoltà a masticare e parlare

I portatori di protesi dentarie hanno spesso difficoltà a masticare e, quando non puoi più goderti i tuoi pasti preferiti, la qualità della tua vita peggiora. Le protesi coprono il tuo palato, cambiando il modo in cui assapori il cibo. Le protesi non perfettamente aderenti influenzano la tua pronuncia, impedendoti di parlare liberamente in pubblico.

## Modifiche al tuo aspetto

Quando mancano i denti o le radici dei denti, l'osso della mascella non riceve più il carico fisiologico e incomincia a riassorbirsi, causando il conseguente ritiro della gengiva. Quando la gengiva si ritira, la protesi si adatta ancor peggio costringendoti a eseguire più interventi di ribassatura dal tuo dentista. I denti mancanti e l'osso mascellare riassorbito non possono più sostenere le labbra dall'interno. Le tue guance e le tue labbra, lasciate senza il supporto necessario, diventano vuote e cedevoli. Il tuo mento inizia a muoversi in avanti e verso l'alto e le tue labbra si ripiegano verso l'interno.


## **Abbiamo buone notizie!**

Il tuo tempo con le protesi dentarie o con i denti persi potrebbe presto finire; **puoi riacquistare il sorriso di una vita** in un solo giorno.\*

## **Il concetto di trattamento Zero Cantilever**

Per ottenere facilmente risultati clinici eccellenti, il sistema implantare dovrebbe fornire al chirurgo e al protesista un pacchetto di prodotti e protocolli perfettamente calibrato. I protocolli devono essere semplici, veloci ed economici. D'altra parte, i prodotti devono essere facili da usare e garantire all'efficacia ed efficienza del dentista. Per questi motivi, Advan ha combinato nello stesso sistema implantare i fattori chiave di successo che ogni dentista sta cercando.

\* Se i criteri del paziente sono soddisfatti e si ottiene un'adeguata stabilità, i nostri impianti possono essere caricati con un restauro provvisorio fisso lo stesso giorno dell'intervento. Il trattamento con impianti dentali è una procedura chirurgica e richiede una valutazione preliminare da parte del vostro dentista per assicurarsi che la vostra salute dentale e generale consentano il trattamento implantare. Determinate condizioni dentali devono essere soddisfatte per eseguire il protocollo di trattamento di carico immediato. Il dentista può suggerire alternative o variazioni del trattamento.

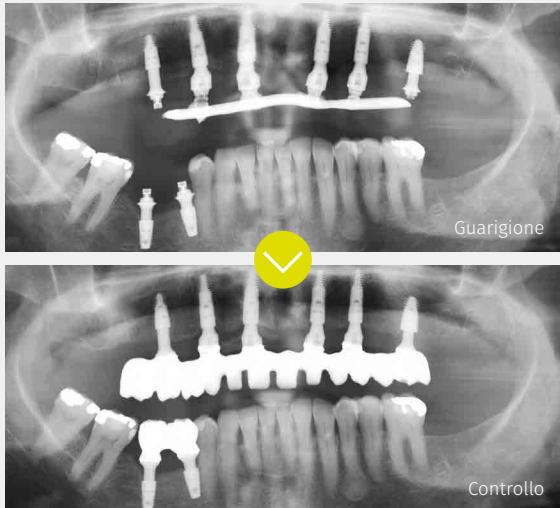

Per gentile concessione del Dr. Albert Vericat - Valencia (ES)

Follow-up clinico a lungo termine con perfetta conservazione dei tessuti perimplantari. Biologicamente sicuro, esteticamente perfetto.

**Non usiamo immagini rielaborate. Vi mostriamo cosa realmente accade con il nostro sistema implantare.**

**Il concetto di trattamento Zero Cantilever** è una comprovata soluzione di impianto dentale progettata appositamente per le persone **con mandibole edentule o con dentatura difettosa**.

Utilizzando i sistemi implantari Advan e l'innovativo concetto di trattamento Zero Cantilever, il tuo dentista può garantire un **restauro dall'aspetto naturale**. Il concetto di trattamento Zero Cantilever fornisce una dentatura provvisoria fissa, funzionale e stabile in un solo giorno\*.

Migliaia di persone hanno beneficiato del concetto di trattamento Zero Cantilever ed è supportato da quasi 10 anni di studi e ricerche. Migliaia di persone hanno scelto un impianto dentale che garantisce prestazioni sia estetiche sia biologiche.

## PERDITA DI PIÙ DENTI

### *Vantaggi dello Zero Cantilever*

#### **Miglioramento della qualità della vita**

Ritrova i denti che sembrano naturali. E, a seconda della situazione, il dentista può posizionare i denti provvisori lo stesso giorno in cui vengono posizionati gli impianti.

#### **Tempi di trattamento più brevi**

Con solo quattro impianti necessari e denti provvisori possibili nello stesso giorno, il trattamento è più veloce e più conveniente rispetto alle alternative comparabili.

#### **Supportato dalla scienza**

Sviluppato da Advan, il suo successo è dimostrato da numerosi studi scientifici e da 10 anni di follow-up clinici.

#### **Investi nel resto della tua vita**


I costi possono sembrare alti a prima vista, ma gli elevati costi di manutenzione di altre riabilitazioni possono renderle più costose a lungo termine. Con una buona manutenzione, i tuoi impianti possono durare tutta la vita.

## — Primi passi per un nuovo sorriso

Durante la consultazione con il tuo dentista, scopri tutto ciò che devi sapere per iniziare il trattamento Zero Cantilever, incluse le informazioni sui costi e i risultati del trattamento.

**Ricorda che lo stesso giorno dell'intervento puoi lasciare la clinica con denti provvisori, fissi e funzionanti! Pronto a mostrare il tuo sorriso dall'aspetto naturale e a godersi la vita!**

Dopo la guarigione della gengiva puoi tornare alla tua clinica dentale per ricevere i denti definitivi, fatti su misura per le vostre specifiche uniche ma con la precisione industriale del servizio Advan Milling Service.

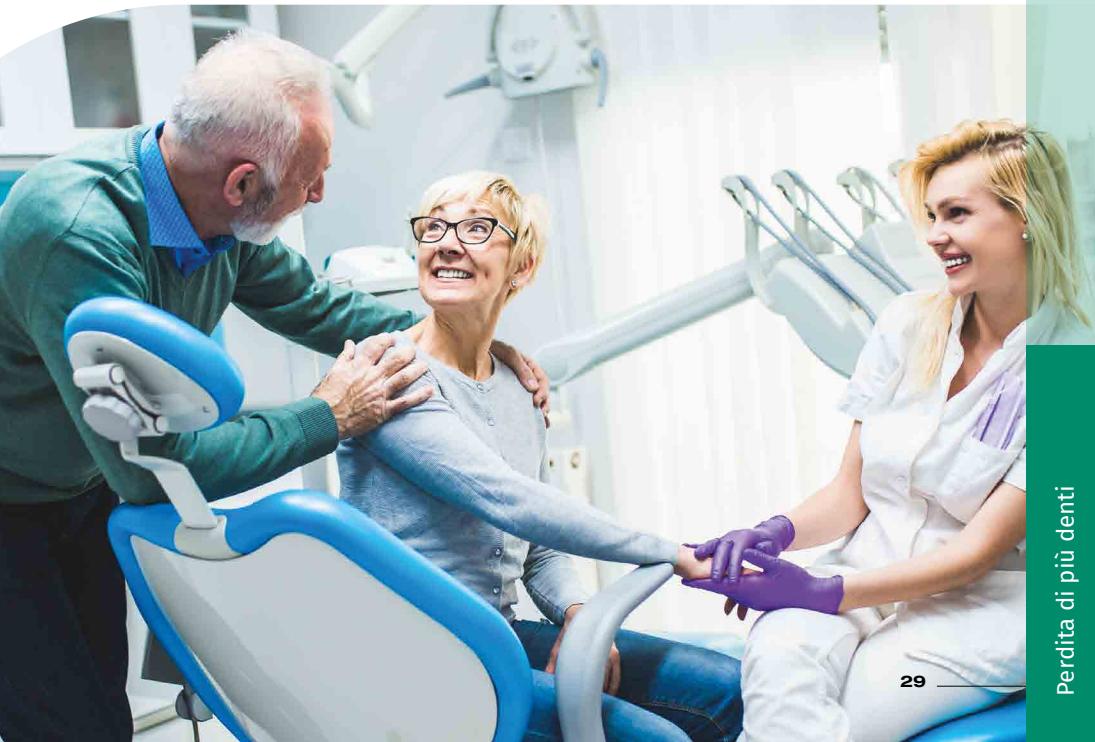

# Indicazioni per i pazienti

Dopo la chirurgia implantare e la riabilitazione protesica è strettamente necessario effettuare regolari visite di controllo, di solito **ogni 6 mesi**. Durante queste visite il dentista controllerà gli impianti dentali e verificherà la corretta igiene orale e la corretta occlusione dentale.

**Il controllo della placca batterica è molto importante per prevenire infezioni gengivali e processi di perdita ossea.** A causa di questo fatto, il paziente deve essere preventivamente informato sulle corrette procedure di cura e igiene dentale.

Dopo una semplice fase chirurgica e una corretta riabilitazione protesica, è molto importante seguire tutte le procedure di igiene raccomandate dal proprio dentista. Una vita longeva, prevedibile e confortevole degli impianti dentali è strettamente legata a queste semplici regole.

## Perché i dentisti scelgono Advan?

- Sorprendenti **risultati clinici** basati su evidenze scientifiche
- Oltre **400 mila impianti** posizionati in migliaia di pazienti
- Soluzioni biologiche, cliniche e tecnologiche **innovative**
- Produzione di qualità **interamente realizzata in Italia**

## Informazioni importanti sulla sicurezza

Il posizionamento degli impianti dentali viene eseguito durante una procedura chirurgica. La chirurgia dentale comporta alcuni rischi generali legati alle procedure di chirurgia orale e non all'impianto dentale stesso: chiedi al tuo dentista le controindicazioni relative alla chirurgia orale in base alla tua situazione di salute generale.

Gli impianti dentali non sono destinati ad essere utilizzati in tutti i pazienti.

Gli impianti dentali potrebbero non integrarsi con l'osso. La percentuale di fallimento precoce dell'impianto è molto bassa, ma se si verifica, dovranno essere rimossi durante una procedura secondaria.

Consulta il tuo dentista per sapere se gli impianti dentali sono adatti a te.

Ulteriori informazioni sono disponibili su [advanimplantology.com/patientsafety](http://advanimplantology.com/patientsafety)



# Reinventare l'implantologia.

**Advan** è il risultato di oltre **25 anni di esperienza** nella progettazione, produzione e vendita di prodotti per implantologia dentale e con l'obiettivo di distribuire il nostro prodotti in tutto il mondo.

In Advan tutti sono consapevoli, e perseguono costantemente, degli obiettivi chiari e definiti per studiare e generare sistemi implantari facili da usare, con elevate prestazioni cliniche e risultati a lungo termine altamente prevedibili, anche attraverso il flusso di lavoro digitale.

Advan fornisce valore significativo ai pazienti e ai professionisti, ognuno è personalmente responsabile e consapevole che la qualità dei nostri prodotti influisce quotidianamente sulla qualità della vita di migliaia di persone.



## — Note





#### **Advan s.r.l.**

info@advanimplantology.com

[www.advanimplantology.com](http://www.advanimplantology.com)

Dichiarazione di non responsabilità: questo opuscolo fornisce informazioni sul trattamento implantare di routine. I piani di trattamento che coinvolgono impianti dentali saranno unici per ogni paziente. Tempi, costi e consegna delle cure saranno personalizzati per adattarsi alla situazione individuale di ciascun paziente. Gli implantologi hanno le loro preferenze riguardo al modo in cui viene erogato un particolare ciclo di trattamento e possono suggerire alternative o variazioni non incluse in queste informazioni. Alcuni prodotti potrebbero non essere approvati dalla legge per la vendita in tutti i mercati. Solo per uso professionale. Attenzione: la legge federale (Stati Uniti) limita questo dispositivo alla vendita da parte o su ordine di un dentista. Vedere le istruzioni per l'uso per informazioni complete sulla prescrizione, comprese indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni. Advan, il logo di Advan e tutti gli altri marchi sono, se non diversamente indicato o è evidente dal contesto in un determinato caso, marchi di Advan.