

SBIANCAMENTO DENTALE COSMETICO PROFESSIONALE

OPALESCEENCE GO™ 6%

TRATTAMENTO DOMICILIARE CON MASCHERINE UNIVERSALI PRECARICATE

Opalescence GO™ è lo sbiancamento domiciliare con Perossido di Idrogeno al 6%, pronto all'uso.

Le esclusive mascherine praprecaricate UltraFit™ si conformano facilmente ad ogni arcata con una estensione da molare a molare e la loro straordinaria adattabilità garantisce il massimo contatto tra il gel e i denti durante l'intero trattamento.

- Perossido di Idrogeno al 6%
- Il gel sbiancante Opalescence Go™ contiene PF (Nitrato di Potassio e Fluoro)
- Senza Glutine
- Tempo di applicazione 60–90 minuti al giorno
- 2 deliziosi gusti: Menta e Anguria



UTILIZZO

- Trattamento sbiancante domiciliare con mascherine universali precaricate di gel per l'intera arcata dentale
- Ideale come trattamento completo oppure come introduzione allo sbiancamento o mantenimento nel tempo



CASI CLINICI



Prima



Dopo



Prima



Dopo

800 830 715 ULTRADENT.COM/IT

Ultradent Italia Srl - Via G.L. Bernini, 7 20094 Corsico (MI)

U2
ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE



1. Estrarre il blister dalla confezione e posizionare la mascherina superiore sui denti. (U= arcata superiore; L= arcata inferiore)



2. Chiudere i denti con decisione, quindi aspirare la mascherina per 2 secondi.



3. Rimuovere la mascherina esterna colorata, lasciando quella interna bianca sui denti. Ripetere la procedura per la mascherina inferiore.



4. Dopo il tempo di applicazione indicato, rimuovere le mascherine e lavare i denti.

VELOCE SEMPLICE EFFICACE



800 830 715 ULTRADENT.COM/IT

Ultradent Italia Srl - via G.L. Bernini, 7 20094 Corsico (MI)

U2
ULTRADENT
PRODUCTS, INC.